

Manual de Via[®] Nano 6.1

Edición en español



Modelo ViaNano6.1

Información sobre derechos de autor y marcas

© 2024 PRC-Saltillo. Se conceden derechos para imprimir para uso no comercial, sea clínico o personal, si incluye el aviso de derechos de autor. Se prohíbe el uso comercial; no lo puede usar para reventa. Contacte a PRC-Saltillo para preguntas sobre usos permitidos.

AAC Coaching Corner™, AAC Language Lab®, AAC Learning Journey™, Accent®, AeroSwitch®, AeroText™, ChatEditor™, ChatFusion™, ChatPoint™, ChatSMS®, ChatWrap®, CoreScanner™, Dialogue®, Empower®, Engage®, Essence®, Freedom Switch™, iSharePRC®, LAMP™, LAMP Words for Life®, Look®, Minspeak®, NovaChat®, NuEye®, NuPoint®, NuVoice®, PASS™, PRIO®, Realize Language™, Semantic Compaction®, Timocco-on-Accent™, TouchChat®, UNIDAD®, Unity®, VersaChat™, VersaEye™, VersaSpeaker™, VersaWrap™, Via®, VocabPC™ y Xtreme™ son marcas registradas de PRC-Saltillo.

AirDrop®, App Store®, Apple®, Apple Books®, FaceTime®, Guided Access®, iCloud®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPadOS®, iPad Pro®, iPhone®, iPod®, iTunes®, Lightning®, Mac®, Macintosh®, Safari®, Siri®, TouchID® y TrueDepth® son marcas registradas de Apple Inc.

Acapela Group® y my-own-voice™ son marcas registradas de Acapela Group. Acapela Group, Copyright 2024. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. La tecnología de texto a habla de Acapela y las voces sintéticas incluidas en este programa se incluyen sin costo para el usuario, pero solo se permite su uso para propósitos de comunicación y no se permite venderlo, copiarlo o de cualquier manera explotarlo con fines de lucro.

La marca y el símbolo de *Bluetooth*® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que haga PRC-Saltillo de estas marcas es bajo licencia.

CAVIWIPES™ es una marca de Metrex Research LLC.

Dropbox® es una marca registrada de Dropbox, Inc.

Google™, Google Docs™, Google Drive™, Google Play™, Android™, Chromebook™, Gmail™ y YouTube™ son marcas de Google, Inc.

Intel®, el logotipo de Intel, Intel® Core™ y Celeron® son marcas de Intel Corporation o sus subsidiarias.

iOS® es una marca o una marca registrada de Cisco en los Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia.

Ivona es suministrada por ReadSpeaker.

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

My QuickChat™ es propiedad de Talk To Me Technologies.

Netflix® es una marca de Netflix, Inc.

PCS® es una marca de Tobii Dynavox LLC. Todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Samsung® and Galaxy Tab® son marcas registradas de Samsung Electronics America, Inc.

Los símbolos utilizados en esta obra son propiedad de n2y, LLC. Se utilizan con permiso y bajo licencia. © 2024.

TIK TOK es una marca de Bytedance Ltd.

Velcro® es una marca registrada de Velcro BVBA.

VocalID™ es una marca registrada de VocalID, Inc.

The Voice Keeper y las voces de Almagu son propiedad intelectual de Almagu.

WHATSAPP es una marca de WHATSAPP LLC.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Windex® es una marca registrada de S. C. Johnson & Son, Inc.

WordPower® es una marca registrada de Inman Innovations, Inc; © 2001-2024; todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Versión/modelo del documento

DOC100204v100 · 12/19/2024

Se aplica al modelo ViaNano6.1; equipos dedicados y no dedicados

Contents

Descripción general del equipo	4
Servicio al cliente y soporte técnico	4
Obtener ayuda	4
Equipos dedicados	4
Características del equipo	5
Cómo montar el equipo	6
Encendiendo y apagando el equipo	7
Encendiendo y apagando el amplificador	7
Ajustando el volumen	8
Usando la pantalla táctil	8
Cargando el equipo y el amplificador	9
Limpiando y desinfectando el equipo	11
Limpiando y desinfectando	11
Desinfectando el equipo y sus accesorios para múltiples usuarios.....	12
Cómo configurar AeroSwitch con su equipo	13
Cómo encontrar los manuales de la aplicación	14
TouchChat	14
LAMP Words for Life	14
Dialogue AAC.....	14
Usando el acceso guiado	15
Finalizar una sesión de acceso guiado.....	15
Reiniciar una sesión de acceso guiado	15
Cómo desechar su equipo	16
Borrar información privada de un equipo no dedicado	16
Organice la eliminación de información privada de un equipo dedicado	16
Desechar el equipo	16
Especificaciones	17
Información de seguridad	18
Información de cumplimiento	21
Información de contacto	30

Descripción general del equipo

Via® Nano 6.1 es un equipo de generación de habla que aumenta la comunicación para individuos con impedimentos de habla y lenguaje. Este equipo y sus programas de idioma le posibilitan al usuario iniciar conversaciones, buscar información, expresar opiniones y compartir sus sentimientos. La cubierta y el caparazón sirven para protección, mientras que el amplificador Bluetooth® y el amplificador aumentan el audio.

El equipo se puede sostener con la mano o colocar sobre una superficie plana y utilizar con un soporte. Se puede acceder al equipo mediante la pantalla táctil o una variedad de interruptores.

Este manual ofrece instrucciones paso a paso para comenzar a utilizar su equipo.

Servicio al cliente y soporte técnico

Obtener ayuda

Si requiere asistencia configurando, usando o dando mantenimiento a su equipo Via Pro o Via Mini, o si tiene algún problema, por favor contáctenos por uno de los siguientes métodos:

Teléfono: 1-877-872-1428

Correo electrónico service@saltillo.com

Soporte del sitio web de Realize Language: support@realizelanguage.com

Equipos dedicados

Un equipo dedicado está configurado únicamente para comunicación. Su fuente de financiamiento requiere que el equipo esté bloqueado al ser enviado. Si desea activar funciones adicionales, por favor comuníquese con PRC-Saltillo Order Management al (800) 262-1933 o envíe un correo electrónico a sales@prc-saltillo.com.

Se configura un equipo dedicado con el acceso guiado activado. Si no puede encontrar el código de acceso al acceso guiado en la caja de envío, llame a nuestro equipo de soporte para obtener esta información. Para obtener información sobre el uso del acceso guiado, consulte [Usando el acceso guiado](#).

Características del equipo


Vista frontal



- 1 Orejetas para fijar una correa*
- 2 Caso
- 3 Pantalla táctil
- 4 Botones de volumen
- 5 Botón de reposo/activación

* Su equipo viene con una correa para la muñeca y una correa para el hombro.

Vista trasera

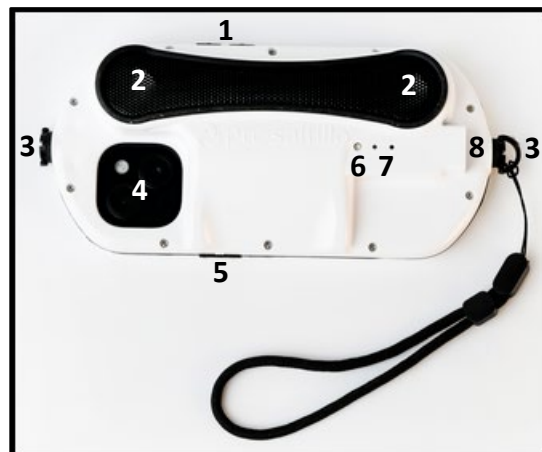

- 1 Botones de volumen
- 2 Altavoces del amplificador
- 3 Orejetas para fijar una correa
- 4 Cámara trasera
- 5 Botón de reposo/activación
- 6 Botón para reiniciar amplificador
- 7 Luces LED de amplificador
- 8 Puerto USB-C

Vista lateral



- 1 Orejetas para fijar una correa
- 2 Puerto USB-C
- 3 Botones de volumen
- 4 Pantalla táctil

Cómo montar el equipo

Si desea montar el equipo, utilice una herramienta para quitar las orejetas de sujeción de la correa. A continuación, utilice los orificios de montaje de 1/4-20 expuestos para colocar el soporte.




⚠ Las orejetas pueden suponer un peligro de asfixia. Colóquelas en un lugar seguro.

Encendiendo y apagando el equipo

Esta sección se aplica únicamente a equipos no dedicados.

El botón de encender/apagar le permite encender y apagar el equipo.

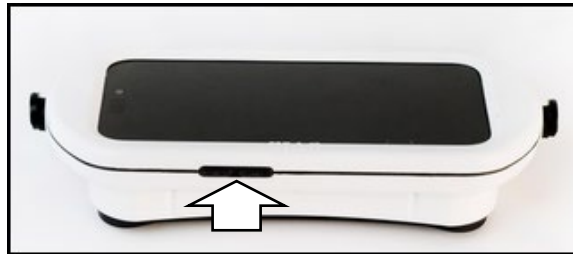

Para encender el equipo: Toque y sostenga el botón de encender/apagar hasta que vea el logo de Apple® en la pantalla.

Para apagar el equipo: Toque y sostenga el botón para encender/apagar y el botón para aumentar o disminuir el volumen hasta que vea la pantalla para apagar el equipo. Deslice el botón que aparece en pantalla a la derecha para apagar el equipo.

Encendiendo y apagando el amplificador

El botón de reinicio/encendido del amplificador tiene la etiqueta "I/O" y está oculto en un hueco. Cuando necesites presionarlo, utiliza un alfiler.



Para apagar el amplificador: Mantenga presionado el botón hasta que el LED del amplificador se apague.

Para encender el amplificador: presione el botón durante un segundo. El LED del amplificador parpadeará para indicar que el amplificador está encendido.

Ajustando el volumen



Usar auriculares o audífonos con el volumen o una presión de sonido excesiva puede causar pérdida de audición por períodos de tiempo extendidos.

Los botones de volumen están ubicados en la esquina superior del equipo. Un botón aumentará el volumen mientras el otro lo reducirá.




Usando la pantalla táctil

Su equipo incluye una pantalla táctil. Responde mejor a un toque ligero con la punta del dedo.

¡Importante! Usar demasiada fuerza o un objeto metálico para usar la pantalla táctil puede dañar la superficie de cristal.

Se incluyó un estilete con su equipo. Si prefiere comprar otro estilete, asegúrese que sea compatible con la pantalla táctil. El estilete provisto tiene un hoyo en uno de los extremos que puede amarrar a una persona o al equipo. Encuentre una cadena o algún hilo que vaya con su estilo personal.



 El lápiz óptico puede suponer un riesgo potencial de pincharse el ojo.

Cargando el equipo y el amplificador

Conectando el cargador

Recibió un cargador para la batería con el equipo. Un lado del cargador se conecta a un tomacorriente – recomendamos un protector contra sobretensiones. El otro lado del cable tiene un conector tipo USB-C, que le permite cargar el equipo y el amplificador a la vez.



- 1 LED amplificadores
- 2 Puerto USB-C

- ⚠ Use solamente el cargador de batería incluido con el equipo.
- ⚠ Los cables pueden presentar riesgos de enredamiento o estrangulación. Por favor tome esto en consideración antes de dejarlos con el usuario.
- ⚠ Debe verificar los cables, los cordones y los conectores de forma regular para verificar si han sufrido daño o desgaste, particularmente en donde estén sujetos a mayor estrés. Los cables y los cordones se pueden desgastar o dañar si se les da mucho uso o con el tiempo. Por ejemplo, un cable desgastado puede ocasionar un corto circuito en el cargado/adaptador, lo cual representa un peligro para el usuario. Si cualquier cable, cordón o conector está dañado o desgastado, llame al departamento de servicio para coordinar una sustitución.
- ⚠ Ubique el equipo en un lugar seguro mientras lo carga.
- ⚠ El cliente no puede sustituir las baterías.

Para cargar el equipo y el amplificador:

Consejo: Sugerimos cargar el sistema todas las noches.

1. Conecte el cable USB-C del cargador al puerto de carga del equipo.
2. Conecte el otro lado del cargador a un tomacorriente o protector contra sobretensiones.
3. La luz ámbar al lado del puerto de carga parpadeará mientras carga y permanecerá encendida cuando el amplificador esté completamente cargado.

Cuando el equipo y el amplificador estén completamente cargados:

1. Desconecte el cargador del equipo.
2. Desconecte el cargador del tomacorriente o el protector contra sobretensiones (*opcional*).
3. Toque brevemente el botón para encender y apagar el equipo para encender la luz de la pantalla.

Verificando el estado de la batería

Para verificar el nivel de la batería o el estado de carga en cualquier momento, cree un botón con la función de Estado de batería o encuentre y toque un botón de este tipo en su archivo de vocabulario.

Extendiendo la carga

Para extender la duración de carga, puede oscurecer la pantalla. Vaya a **Configuraciones y Pantalla & Brillo** en el software del iPad y arrastre el deslizador.

Desechando el equipo o la batería del amplificador

- ⚠ **Desechando el equipo:** Por favor deseche su equipo de acuerdo con las leyes locales, estatales y/o federales de reciclaje de desechos electrónicos.
- ⚠ **Desechando la batería:** Si tiene que sustituir la batería de su amplificador, deseche la batería vieja de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y/o nacionales.

Limpiando y desinfectando el equipo

Si sólo un cliente usará el equipo, limpiarlo y desinfectarlo debe ser suficiente. Sin embargo, si varios clientes usarán el equipo, puede tomar medidas adicionales para limpiar y desinfectar el equipo cuando un cliente acabe de usarlo, de tal manera que otro cliente lo pueda usar.

Limpiando y desinfectando

¡Importante! No use químicos solventes o abrasivos, o rocíe la unidad con agua o detergente.

Limpiando la pantalla táctil

La pantalla táctil es muy sensible. Cosas como manchas en las manos, sucio y mugre pueden afectarla. La pantalla también reacciona a gotas de agua y extremos de temperatura (condensación).

Para limpiar la pantalla táctil, use un paño seco, suave y sin pelusa. Si necesita limpiarlo más, puede humedecer un paño sin pelusa y luego secarlo con otro paño seco.

Limpiando los componentes del equipo y la cubierta

Puede desmontar la unidad y mojar los componentes del equipo y la cubierta en agua caliente con jabón. Seque todo bien antes de montar la unidad nuevamente. La mejor forma de darle limpieza rutinaria es secar los accesorios a mano, colocarlos en una toalla seca y permitir unos cinco minutos para que se seque bien antes de volver a colocarlos en el equipo.

Desinfectando

Para desinfectar todo excepto la pantalla, use una solución de vinagre y agua ($\frac{1}{4}$ de taza de vinagre por cada taza de agua). Limpie la cubierta de goma (pero no la pantalla) con un paño humedecido en esta solución.

Limpie la cubierta de plástico por separado con la solución de agua y vinagre. Asegúrese que todo el equipo se seque antes de montarlo nuevamente. ***¡No use vinagre y agua en la pantalla!***

¿Y qué hago con la baba/saliva?

Debe limpiar la saliva inmediatamente, especialmente si cae en la pantalla táctil o cerca de alguno de los conectores. Use un paño sin pelusa un poco húmedo para limpiar el equipo.

¿Y qué hago con derrames, lluvia o inmersiones accidentales?

Si se le cae cualquier sustancia líquida en su equipo, si le cae lluvia o si accidentalmente queda inmerso en algún líquido, inmediatamente seque todos los componentes lo mejor que pueda. Intente usar el equipo. De no funcionar, llame al departamento de servicio de Saltillo y explique lo que pasó. Tal vez le pidan que envíe su equipo para servicio.

Desinfectando el equipo y sus accesorios para múltiples usuarios

Nota: Esta sección sólo aplica cuando múltiples clientes usarán el equipo. En este caso, es crucial que desinfecte adecuadamente el equipo y los accesorios que un cliente usó antes de que otro cliente los use.

Primer paso: Use guantes de protección

Próximo paso: Limpie el equipo y sus accesorios

1. Limpie el equipo y sus accesorios con toallitas desinfectantes (virucida, bactericida, pseudomonacida, tuberculocida, fungicida) – Metrex CaviWipes™. Siga las instrucciones del fabricante del producto para *limpiar*.
2. Use un Q-tip con algún detergente (por ejemplo, Windex® u otro limpiador comercial) y limpie toda grieta y hendidura. Puede usar un cepillo de dientes u otro similar.
3. Puede usar una manguera de aire o un pañito para secarlo.

¡Importante! Asegúrese de quitar bien el sucio del equipo y sus accesorios. Esto es crucial antes de desinfectar el equipo.

Próximo paso: Desinfecte los componentes del equipo y sus accesorios

1. Limpie el equipo y sus accesorios con otro pañito desinfectante (virucida, bactericida, pseudomonacida, tuberculocida, fungicida) – Metrex CaviWipes. Siga las instrucciones del fabricante del producto para *desinfectar*.
2. Asegúrese de limpiar toda grieta y hendidura, limpiando más de una vez si es necesario para que el equipo esté mojado por un mínimo de tres (3) minutos.
3. Permita que el equipo y sus accesorios se sequen.

Paso final: Limpie la pantalla táctil

1. Una vez el equipo y sus accesorios estén secos, limpie el área de visualización (pantalla táctil, etcétera) con un limpiador de cristal para asegurarse que la pantalla no se descolore.
2. Permita que el equipo se seque.

Cómo configurar AeroSwitch con su equipo

AeroSwitch® es un interruptor remoto que se puede utilizar para controlar de forma inalámbrica los equipos de generación de voz electrónica.

Si escanea dentro de la aplicación TouchChat, LAMP Words for Life (WFL) o Dialogue AAC:

Configure su equipo en modo Transmisión (Broadcast).

1. Asegúrese de que AeroSwitch esté apagado.
2. Ajuste el dial giratorio al modo Transmisión que desea utilizar y encienda AeroSwitch.
3. En TouchChat, WFL o Dialogue, seleccione **Menú > Configuraciones > Entrada > Escaneo** y asegúrese de que esté seleccionada la opción **Escaneo activado**.
4. Elija **Escaneo > Configurar interruptores > Configuración de interruptores** y seleccione **1 interruptor** o **2 interruptores**.
5. Si seleccionó **1 interruptor**, aparecerá la indicación “Presione cualquier interruptor”. Presione y suelte el interruptor que prefiera.
6. Si seleccionó **2 interruptores**, seleccione **Interruptor 2** y presione y suelte el segundo interruptor.

Si está utilizando el escaneo de iOS:

Configure su equipo en modo Teclado (Keyboard).

1. En la configuración de iOS de su equipo, abra la configuración de Bluetooth.
2. Asegúrese de que AeroSwitch esté apagado.
3. Ajuste el dial giratorio al modo de teclado que desea utilizar y encienda AeroSwitch.
4. Presione y suelte el botón de emparejamiento AeroSwitch. *El LED azul debe estar parpadeando.*
Nota: Esto hace que AeroSwitch sea detectable en su equipo.
5. En el equipo, seleccione AeroSwitch en la configuración de Bluetooth del equipo.
6. Si se le solicita un código, ingrese **000000**.
7. Toque **Emparejar**.

Nota: Para configurar el escaneo de interruptores, consulte la documentación disponible para su equipo.

Cómo desconectar o desemparejar AeroSwitch y el equipo

Si conectó AeroSwitch en modo Transmisión, no necesita desconectarlo del equipo.

Si conectó el interruptor en modo Teclado, desconéctelo al seleccionar **Configuración de iOS > General > Bluetooth > AeroSwitch** y, a continuación, seleccione **Olvidar este equipo**.

Cómo encontrar los manuales de la aplicación

Su equipo Via Pro viene con una de las siguientes aplicaciones iOS®/iPadOS® preinstaladas.

TouchChat

La aplicación TouchChat® es una solución de comunicación con todas las funciones para personas que tienen dificultades para utilizar su voz natural. TouchChat está diseñada para personas con autismo, síndrome de Down, ELA, apraxia, accidente cerebrovascular u otras afecciones que afectan la capacidad de una persona para utilizar el habla natural.

Las palabras, frases y mensajes se pronuncian con un sintetizador de voz integrado. Hay varias voces sintetizadas disponibles en varios idiomas, lo que permite al usuario elegir una voz que se adapte a su personalidad.

Para obtener información sobre el uso de la aplicación:

visite <https://touchchatapp.com/manuals-and-qrgs>.

LAMP Words for Life

LAMP Words for Life® es un sistema de lenguaje sólido que combina el poder del sistema de lenguaje Unity® de PRC y el método de adquisición del lenguaje a través de la planificación motora (LAMP™). La aplicación es adecuada para comunicadores principiantes que recién están aprendiendo que pueden afectar a quienes los rodean y para comunicadores expertos con habilidades lingüísticas avanzadas. La aplicación se basa en símbolos, pero estos se combinan con texto para apoyar el desarrollo de la alfabetización.

Cada palabra se produce mediante un patrón motor único y consistente. Cuando se utiliza un patrón motor consistente para producir una respuesta consistente, con el tiempo y la práctica, el movimiento se vuelve automático y se puede producir rápidamente.

Para obtener información sobre el uso de la aplicación:

visite <https://lampwflapp.com/support/support-articles/lamp-users-guide>.

Dialogue AAC

Dialogue® AAC es una aplicación para iOS diseñada para personas alfabetizadas que requieren CAA (comunicación aumentativa y alternativa). El banco de mensajes integrado permite que la persona importe mensajes que utilizan su propia voz. Se puede acceder a la aplicación mediante el tacto, el escaneo o el seguimiento de la cabeza.

El sistema de vocabulario Essence® es un sistema de vocabulario simple basado en la ortografía y las frases que se adapta a diferentes capacidades visuales y motoras. El vocabulario Essence permite a las personas utilizar la ortografía y la predicción de palabras para decir prácticamente cualquier cosa. La personalización con oraciones específicas y personalizadas es fácil de hacer, lo que permite que el sistema crezca con las necesidades de cada persona.

Para obtener información sobre el uso de la aplicación:

visite <https://www.prc-salttillo.com/dialogueaacapp#support>.

Usando el acceso guiado

Los equipos Via Pro y Via Mini dedicados se configuran con el acceso guiado activado. Si no puede encontrar el código de acceso guiado en su caja de envío, llame a nuestro equipo de soporte para obtener esta información.

¡Importante! Si cambia el código de acceso en cualquier momento, PRC-Saltillo no podrá recuperar su nuevo código de acceso.

El acceso guiado lo ayuda a concentrarse en lo que necesita hacer en la aplicación al limitar temporalmente a qué le permitirá acceder el equipo.

- Restringir el equipo a una sola aplicación
- Controlar qué funciones de la aplicación están disponibles
- Desactiva áreas de la pantalla que no se aplican a lo que intentas hacer en la aplicación
- Desactivar los botones de hardware del equipo
- Limitar el tiempo que se puede utilizar la aplicación

Finalizar una sesión de acceso guiado

1. Haga triple clic en el botón Inicio o en el botón superior (según el modelo de iPad).
2. Ingrese el código de acceso guiado.
3. Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para navegar hasta el menú de iOS.

¡Importante! Si decide cambiar su contraseña de acceso guiado, anótela y guárdela en un lugar seguro. PRC-Saltillo no puede restaurar una contraseña de acceso guiado olvidada.

Reiniciar una sesión de acceso guiado

1. Abra la aplicación TouchChat.
2. Haga triple clic en el botón Inicio o en el botón superior. Aparecerá brevemente el mensaje "Acceso guiado iniciado".

Nota: Los valores predeterminados de la opción de acceso guiado se muestran a continuación:

Botón superior	<input checked="" type="checkbox"/>
Botones de volumen	<input checked="" type="checkbox"/>
Movimiento	<input type="checkbox"/>
Teclados virtuales	<input checked="" type="checkbox"/>
Tacto	<input checked="" type="checkbox"/>
Límite de tiempo	<input type="checkbox"/>

Para obtener información adicional sobre el acceso guiado:

Vaya a la sección "Usar acceso guiado en iPad" de la Guía del usuario de iPad:

<https://support.apple.com/guide/ipad/use-guided-access-ipada16d1374/ipados>

Cómo desechar su equipo

Si necesita desechar su equipo, primero borre toda la información privada que contenga.

¡Importante! Si borras información privada, se eliminarán tus vocabularios personalizados y otros archivos importantes. Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus vocabularios y otros archivos importantes.

Borrar información privada de un equipo no dedicado

1. Desliza el dedo hacia arriba para desbloquear el botón de inicio (si es necesario).
2. Pulsa en **Configuración**.
3. Pulsa en **General**.
4. Desplázate hacia abajo y pulsa en **Restablecer**.
5. Pulsa en **Borrar contenido y configuración**.
 - Pulsa en **Borrar ahora** en el mensaje "¿Quieres actualizar tu copia de seguridad de iCloud antes de borrar?"
 - Ingresa el código de restricción del equipo.
 - Pulsa en **Borrar** en el cuadro emergente Borrar iPad.
 - Pulsa en **Borrar** en el segundo cuadro emergente Borrar iPad.
 - Ingresa la contraseña de la cuenta en el equipo.
6. El equipo borrará el contenido y se reiniciará.

Organice la eliminación de información privada de un equipo dedicado

1. Contacte al PRC-Salttillo Service.
Teléfono: 1-877-872-1428
Correo electrónico: service@prc-salttillo.com
2. Siga las instrucciones proporcionadas por el Servicio para embalar y enviar su equipo.

Desechar el equipo

1. Asegúrese de borrar toda la información privada de su equipo mediante uno de los procedimientos anteriores.
2. Deseche el equipo de acuerdo con las leyes de reciclaje electrónico locales, estatales o federales.

Especificaciones

Peso

1,0 libra (0,47 kg)

Dimensiones

7,72 pulgadas (19,61 cm) x 3,59 pulgadas (9,13 cm) x 1,45 pulgadas (3,69 cm).

Duración de la batería

10-12 horas, dependiendo del uso individual y configuraciones de la batería

Programa/Sistema operativo

TouchChat, LAMP Words for Life, Dialogue AAC apps / iPadOS

Componentes estándar

Amplificador, cubierta, cargador de batería/cable USB, estilete

Entorno operativo

Temperatura ambiental: 5°C a 40°C (41°F a 104°F)

Humedad relativa: 15% a 93%, sin condensación

Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa

Necesita proteger el equipo de humedad al usarlo.

Entorno de transporte y almacenaje

Cuando esté transportando o almacenando este equipo, el rango de temperaturas al cual puede estar expuesto el equipo es de -25°C (-13°F) sin control de humedad relativa a 70°C (158°F) con una humedad relativa de hasta 93% sin condensación.

Condiciones de temperatura para contacto directo

A una temperatura ambiente de 40°C (104°F), la temperatura de la superficie de la parte posterior del equipo puede aumentar hasta 11°C (51.8°F) durante la carga a una temperatura de 51°C (123.8°F). Por esta razón, minimice el contacto con la parte posterior del equipo mientras el equipo se está cargando.

- Mientras el equipo se está cargando, si toca la superficie del equipo con una lesión en la piel, puede empeorar la herida.
- Mientras el equipo se está cargando, los infantes o individuos vulnerables no deben tocar la superficie del equipo si se pueden quemar la piel.
- Mientras el equipo se está cargando, minimice el contacto con la parte posterior del equipo mientras se carga.

Información de seguridad

Emergencias

- ⚠ Este equipo no está diseñado para hacer llamadas de emergencia ni para usarse como el único medio de apoyo de comunicación.

Modificaciones

- ⚠ No intente modificar el equipo ni ninguno de sus accesorios. Las modificaciones podrían crear un riesgo de seguridad y hacer que el equipo deje de funcionar.

Limpieza, mantenimiento y servicio

- ⚠ No intente darle servicio o mantenimiento al equipo mientras esté prendido. Desconecte y apague el equipo antes de limpiar o desinfectarlo.
- ⚠ Si su equipo o algún accesorio está dañado, pare de usar el equipo inmediatamente para evitar posibles lesiones, llame a apoyo técnico para solicitar ayuda, y devuelva el artículo dañado para reparación. No intente repararlo por su cuenta.

Accesorios

- ⚠ No use accesorios, partes removibles o materiales que no estén contemplados en esta guía de uso.
- ⚠ No use accesorios, partes removibles o materiales de alguna forma que no esté contemplada en esta guía de uso.

Montaje y posición

- ⚠ Solo personas calificadas deben colocar monturas. De no instalar el sistema de montura de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede ocasionarle daño al usuario. Asegúrese de que la montura no obstruya la visión del usuario.
- ⚠ Una persona calificada debe analizar el posicionamiento para evitar lesiones por esfuerzo repetitivo en el usuario.

Visión y audición

- ⚠ El compañero de comunicación debe asegurarse que el usuario tome una pausa regularmente para evitar la fatiga visual.
- ⚠ Consulte a su proveedor de cuidado visual sobre consideraciones de posicionamiento de equipo para el usuario.
- ⚠ Volumen o presión de sonido excesivo al usar audífonos o auriculares puede causar pérdida de audición a largo plazo. Ajuste el volumen a un nivel bajito y solo aumentelo hasta que pueda escuchar de forma cómoda.

Puertos y cables

- ⚠ Mantenga los puertos del equipo y los cables de conexión limpios para que hagan buen contacto y maximizar la vida útil de su equipo. Los cables sucios transfieren el material contaminante al puerto conector del equipo, y esto puede degradar el rendimiento del equipo.
- ⚠ Si su equipo estuvo expuesto a agua, cada puerto USB tendrá que estar completamente seco antes de insertar un cable USB. Para remover humedad de cada puerto USB, sacuda el equipo varias veces con cada puerto USB boca abajo y use un paño de microfibra para secar completamente el equipo. Luego verifique el puerto USB de nuevo. Si cualquier puerto USB permanece húmedo, repita el proceso de sacudir y secar.
- ⚠ No intente insertar un cable con fuerza a un puerto. Asegúrese de que esté insertando el conector al puerto correcto y que el conector esté orientado de tal forma que coincida con la orientación del puerto.

Partes pequeñas, cables y correas

- ⚠ Los lazos, cables y correas pueden presentar riesgo de enredamiento o estrangulación. Por favor considere esto antes de colocarlos al alcance de los usuarios de equipo.
- ⚠ Debe verificar los cables, los cordones y los conectores de forma regular para verificar si han sufrido daño o desgaste, particularmente en donde estén sujetos a mayor estrés. Los cables y los cordones se pueden desgastar o dañar si se les da mucho uso o con el tiempo. Por ejemplo, un cable desgastado puede ocasionar un corto circuito en el cargado/adaptador, lo cual representa un peligro para el usuario. Si cualquier cable, cordón o conector está dañado o desgastado, llame al departamento de servicio para coordinar una sustitución.
- ⚠ Al desconectar un cable, agarre el conector en lugar del cable como tal para evitar daño o desgaste.
- ⚠ Siempre use los cables, sea para cargar el equipo o para transferir archivos de vocabulario, de acuerdo con las instrucciones en el manual.
- ⚠ Las piezas pequeñas pueden ser un riesgo de ahogo u otra lesión.
- ⚠ De quitar el estante, puede o pinchar un ojo. Almacénelo en un lugar seguro.
- ⚠ El lápiz óptico puede suponer un riesgo potencial de pincharse el ojo.

Pantalla

- ⚠ No use el equipo si la pantalla está agrietada o rota.

Emisiones/Interferencia

- ⚠ Los equipos de comunicaciones de RF portátiles (incluidos los periféricos, como cables de antena y antenas externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del equipo, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo. Aléjese, si es posible, de la fuente de interferencia.
- ⚠ Este equipo no ha sido probado para comprobar su compatibilidad con todos los demás emisores de RF potenciales, como rayos X, detectores de metales, equipos electroquirúrgicos, equipos de diatermia, telefonía celular 5G, NFC, WPT o equipos de vigilancia electrónica de artículos (EAS). Se debe tener precaución si dichos emisores están presentes en el entorno de uso.
- ⚠ Puede producirse un riesgo de aumento de emisiones o disminución de inmunidad si se conectan cables adicionales.
- ⚠ Se debe evitar el uso de este equipo junto a otros equipos o apilado con ellos, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si fuera necesario, se debe observar este equipo y los demás equipos para verificar que funcionen con normalidad.
- ⚠ Al utilizar este equipo en un entorno médico, no lo utilice con ningún producto que no esté aprobado para uso médico. Siga todas las reglas para el uso adecuado de equipos inalámbricos.
- ⚠ El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y provocar un funcionamiento incorrecto.

Agua

- ⚠ Si su equipo estuvo expuesto a agua, cada puerto USB tendrá que estar completamente seco antes de insertar un cable USB. Para remover humedad de cada puerto USB, sacuda el equipo varias veces con cada puerto USB boca abajo y use un paño de microfibra para secar completamente el equipo. Luego verifique el puerto USB de nuevo. Si cualquier puerto USB permanece húmedo, repita el proceso de sacudir y secar.
- ⚠ Su equipo se diseñó para uso en situaciones normales de comunicación. No es a prueba de agua. No rocíe ni salpique líquido directamente sobre el equipo y que sea muy cuidadoso al usarlo alrededor de agua. Al igual que la mayoría de los equipos electrónicos, nunca debe usar el equipo cuando esté en el agua (por ejemplo, en una piscina o baño).

Baterías y carga

- ⚠ Solo use el cargador de batería incluido con su equipo.
- ⚠ No coloque el equipo en un sitio donde sea difícil de usar o de desconectar del cargador.
- ⚠ Siempre siga las instrucciones en el manual cuando esté cargando su equipo.
- ⚠ No inserte ningún objeto en el puerto de carga ya que esto lo puede dañar.
- ⚠ Para evitar golpes eléctricos y daños al equipo, no lo cargue si está mojado o en un área donde pueda mojarse. No maneje el equipo, cargador o cables eléctricos con manos mojadas.
- ⚠ Ubique el equipo en un sitio seguro y seco mientras esté cargando. No cargue el equipo al aire libre.
- ⚠ Mantenga el cargador lejos del agua y no permita que le echen agua o cualquier otro líquido.
- ⚠ Si el cargador o el cable está dañado, llame a servicio técnico para sustituirlo.

Calor

- ⚠ No ubique el equipo en un electrodoméstico como un microondas o un horno, cerca de un fuego o cerca de una fuente de calor como una estufa o un calentador.
- ⚠ No deje el equipo en un vehículo caliente por un período prolongado.

Entorno rico en oxígeno

- ⚠ No lleve el equipo a un entorno rico en oxígeno (quirófano, tienda de oxígeno, etc.).

Tocando la superficie

- ⚠ Mientras el equipo se está cargando, si toca la superficie del equipo con una lesión en la piel, puede empeorar la herida.
- ⚠ Mientras el equipo se está cargando, los infantes o individuos vulnerables no deben tocar la superficie del equipo si se pueden quemar la piel.

Equipos médicos implantables

Debe haber una separación mínima de seis (6) pulgadas entre un equipo móvil inalámbrico y un equipo médico implantado, como un marcapasos, desfibrilador cardioversor implantable, estimulador del nervio vago, derivación o stent, para evitar posibles interferencias magnéticas con el equipo médico. Aquéllos que tengan este tipo de equipo:

- siempre deben mantener el equipo móvil a una distancia mínima de seis (6) pulgadas del equipo médico implantable;
- no deben cargar el equipo móvil en un bolsillo de pecho;
- deben alejar el equipo móvil de ellos mismos inmediatamente si hay motivos para sospechar que está interfiriendo con el equipo médico implantable;
- deben leer y seguir las instrucciones del fabricante del equipo médico implantable. Si tiene alguna pregunta referente a la operación de su equipo móvil inalámbrico con un equipo médico implantable, contacte a su proveedor de cuidado de salud.

Información de cumplimiento

Advertencia de la Comisión federal de comunicaciones (FCC)

Este equipo cumple con la Parte 15 de las reglas de FCC. Su uso está sujeto a dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencia dañina, y (2) este equipo tendrá que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda tener una consecuencia no deseada.

Cambios o modificaciones a este producto no autorizados por PRC-Salttillo pueden exceder los límites del FCC, y obviar la autorización del usuario para usar este producto.

Este equipo se probó y cumple con los límites establecidos para un equipo digital clase B, según las reglas de la Parte 15 de FCC. Estos límites se diseñaron para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una unidad residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencias radiales y, de no instalarse y usarse según las instrucciones, puede ocurrir interferencia dañina a equipos de comunicación radial. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en alguna instalación particular. Puede probar si el producto está causando interferencia con su radio o televisor apagándolo. Si ya no hay interferencia, probablemente estaba siendo causada por este producto o alguno de sus accesorios. Puede intentar corregir la interferencia usando uno de los siguientes métodos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda

Advertencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá

Este equipo cumple con los estándares exentos de licencia de la Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá. Su uso está sujeto a las siguientes condiciones: 1) El equipo no puede causar interferencia y 2) El equipo tiene que aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

PMN canadiense

Este producto incluye BGM220P22A.

Declaraciones de la FCC sobre exposición a la radiación de radiofrecuencia y SAR

Este equipo ha sido probado para cumplir con la tasa de absorción específica (SAR) en el cuerpo. El módulo de radio ha sido evaluado según el Boletín OET 65C (01-01) de la FCC y se determinó que cumple con los requisitos establecidos en las Secciones 2.1093 y 15.247 (b) (4) del Título 47 del CFR que abordan la exposición a la radiofrecuencia de los equipos de radiofrecuencia. Este modelo cumple con los requisitos gubernamentales aplicables para la exposición a ondas de radiofrecuencia. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.

Equipos de comunicaciones inalámbricas

Los equipos de comunicaciones inalámbricas, como equipos de redes domésticas inalámbricas, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus estaciones base, y walkie-talkies pueden afectar a este equipo y deben mantenerse a una distancia mínima de quince centímetros del equipo.

Limitación del uso previsto, terceros y pérdida de datos

PRC-Salttillo no garantiza la funcionalidad de este equipo generador de habla más allá de los términos de garantía asociados al uso previsto de generación de habla. PRC-Salttillo no garantiza ningún programa tercero, ni se responsabiliza por ninguna lesión, daño o reclamaciones debidos al funcionamiento o defecto de cualquier tecnología provista por terceros, páginas de Internet, productos o programas. Cualquier uso añadido puede requerir decisiones clínicas más allá de las evaluaciones que se utilizan para los equipos de generación de habla.

PRC-Salttillo no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o reclamación de terceras partes por usar este equipo.

PRC-Salttillo no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por eliminación de datos al reparar el equipo o sustituir la batería. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes en otro medio (computadora) para no perderlos.

Propósito del equipo

El equipo es un equipo de generación de habla que permite comunicación aumentativa para una persona con impedimento del habla y lenguaje. Este equipo y los programas de lenguaje le dan al usuario la capacidad de iniciar una conversación, buscar información, decir sus opiniones y compartir sentimientos. Puede ser usado de forma portátil, con un estante para la mesa, o montado en una silla de ruedas. Puede acceder mediante la pantalla táctil y el sistema de seguimiento ocular o de seguimiento de cabeza disponible, o una variedad de accesorios de interruptor disponibles. Este equipo no incorpora de ninguna forma sustancias medicinales, derivados de plasma o sangre humana, ni es fabricado usando tejido animal.

Indicaciones y contraindicaciones

Indicación: NovaChat es un equipo de generación de voz que aumenta la comunicación para personas con discapacidades del habla y lenguaje.

Contraindicación: Este equipo no está diseñado para ser un equipo de llamadas de emergencia o la única fuente de ayuda para la comunicación.

Riesgos actuales de aplicación

No se conocen riesgos actuales de aplicación.

Vida útil esperada

La vida útil esperada para este equipo es de cinco años. De desechar su equipo, favor desecharlo de acuerdo con las leyes de reciclaje locales, estatales y/o nacionales.

Usuarios previstos

Los usuarios previstos para este equipo son individuos que lo usan para comunicarse, sus parejas de comunicación y/o la persona que ajusta las configuraciones del equipo, mantiene los expedientes del programa, etcétera. Las fotos y el texto en este documento ayudarán a estos usuarios a usar el equipo según su propósito previsto.

Posición correcta de los usuarios

Con uso normal, se espera que el equipo esté entre 12 a 14 pulgadas del cuerpo del individuo. La distancia varía dependiendo de si el equipo se está usando de forma portátil o montado a una silla de ruedas o mesa.

Habilidades especiales, entrenamiento o conocimiento requerido

No necesita ninguna capacidad o entrenamiento especial para operar o mantener el equipo. Las imágenes y el texto en este documento ayudarán a los usuarios a adquirir el conocimiento para usar el equipo según fue diseñado.

Instrucciones para su uso

- Todas las funciones del equipo son seguras para el usuario. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones en el manual.
- No hay necesidad de apagar el equipo o el amplificador si está usando el equipo a diario. Se recomienda que apague y prenda el equipo una vez a la semana y lo ubique en modo de dormir diariamente.
- Para reportar cualquier incidente serio asociado al equipo, contacte a PRC-Salttillo y a su autoridad nacional.
- Para información sobre cómo limpiar el equipo, consulte el manual del equipo.

Información de contacto para asistencia:

Si necesita asistencia configurando, usando o dando mantenimiento a su equipo, o si necesita reportar algún funcionamiento no deseado del equipo, por favor contáctenos por teléfono al 1-877-872-1428 o a través de correo electrónico por service@salttillo.com.

Instrucciones para almacenar

Si dejará el equipo almacenado por un período prolongado, apague el equipo y el amplificador. Tendrá que cargar los equipos almacenados cada seis meses.

Explicación de los símbolos en los equipos, accesorios o embalajes de PRC-Saltillo



El equipo está en cumplimiento con la comisión federal de comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés).



El equipo está en cumplimiento con los estándares ambientales y de seguridad de la unión europea.



El equipo es conforme con los requisitos de UK MDR 2002.



El equipo está en cumplimiento con los estándares exentos de licencia de la Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá.



Todo el equipo y sus accesorios, con excepción del adaptador, son partes aplicadas tipo BF. "Partes aplicadas" se refieren a la parte del equipo con la cual el usuario entra en contacto físico cuando lo está usando según indicado.



El equipo es compatible con estándares técnicos de ACMA para telecomunicaciones, radiocomunicaciones, EMC y EME.



¡Precaución! Tenga cuidado al operar el equipo para evitar consecuencias indeseables



El equipo emite niveles elevados y potencialmente peligrosos de radiación electromagnética no ionizante.



Recicle los componentes eléctricos. No bote el equipo en la basura.



El grado de protección contra la entrada de agua (IP) del equipo. El grado de protección contra la entrada de agua y objetos sólidos es el que se clasifica.



Mantener seco. El equipo necesita ser protegido de la humedad.



El rango de temperaturas al que puede estar expuesto el equipo durante su uso, transporte o almacenamiento.



El rango de humedad al que puede estar expuesto el equipo durante su uso, transporte o almacenamiento.



El rango de presión atmosférica al que el equipo puede estar expuesto de forma segura durante su uso, transporte o almacenamiento.



Consulte el manual de instrucciones.



Consulte las instrucciones de uso o consulte las instrucciones de uso electrónicas.



El equipo usa tecnología inalámbrica Bluetooth.



El número de modelo del equipo.



El número de serie del equipo.



La fecha de fabricación del equipo y el nombre y dirección del fabricante.



Indica un equipo médico.



El representante autorizado en Suiza.



El representante autorizado en la comunidad europea.



Persona responsable en el Reino Unido.

EMC ACCOMPANYING DOCUMENT

The Via Nano 6 requires special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided in these accompanying documents.

WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the Via Nano 6, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

WARNING: A risk of increased emissions or decreased immunity may result if any additional cables are attached.


WARNING: This device has not been tested for compatibility with all other potential RF Emitters such as X-ray, Metal Detectors, Electrosurgical Equipment, Diathermy Equipment, 5G Cellular, NFC, WPT, or Electronic Article Surveillance (EAS) devices. Caution should be used if such emitters are present within the use environment.

WARNING: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

WARNING: Use of accessories, transducers, and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions		
The Via Nano 6 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Via Nano 6 should ensure that it is used in such an environment.		
Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The Via Nano 6 uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The Via Nano 6 is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage Fluctuations IEC 61000-3-3	Complies	

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
The Via Nano 6 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Via Nano 6 should ensure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8kV contact ±15kV air	±8kV contact ±15kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2kV for power supply lines	±2kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment
Surge IEC 61000-4-5	±1kV line(s) to line (2) ±2kV line(s) to earth	±1kV line(s) to line (2)	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0 % U_T ; 0,5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % U_T ; 1 cycle and 70 % U_T ; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % U_T ; 250/300 cycle	0 % U_T ; 0,5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % U_T ; 1 cycle and 70 % U_T ; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % U_T ; 250/300 cycle	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the Via Nano 6 requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Via Nano 6 be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.
NOTE: U_T is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.			

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
The Via Nano 6 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Via Nano 6 should ensure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 0,15 MHz – 80 MHz 6 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz	3 Vrms 0,15 MHz – 80 MHz 6 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Via Nano 6, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = [3.5/10] \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = [7/10] \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.7 GHz where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^a should be less than the compliance level in each frequency range. ^b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: 
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz to 2.7 GHz	10 V/m 80 MHz to 2.7 GHz	
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			
Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Via Nano 6 is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Via Nano 6 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Via Nano 6.			

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity								
The Via Nano 6 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Via Nano 6 should ensure that it is used in such an environment.								
Immunity test	IEC 60601 test level			Compliance level			Electromagnetic environment - guidance	
	MHz	Modulation	Field Strength	MHz	Modulation	Field Strength		
IMMUNITY to proximity fields from RF wireless communications equipment	385	18 Hz	27 V/m	385	18 Hz	27 V/m	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Via Nano 6, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $E = [6/d] \sqrt{P}$ $d = [6/E] \sqrt{P}$ where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer, d is the recommended separation distance in meters (m), and E is the field strength in V/m. Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance level in each frequency range. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:	
	450	18 Hz	28 V/m	450	18 Hz	28 V/m		
	710	217 Hz	9 V/m	710	217 Hz	9 V/m		
	745	217 Hz	9 V/m	745	217 Hz	9 V/m		
	780	217 Hz	9 V/m	780	217 Hz	9 V/m		
	810	18 Hz	28 V/m	810	18 Hz	28 V/m		
	870	18 Hz	28 V/m	870	18 Hz	28 V/m		
	930	18 Hz	28 V/m	930	18 Hz	28 V/m		
	1720	217 Hz	28 V/m	1720	217 Hz	28 V/m		
	1845	217 Hz	28 V/m	1845	217 Hz	28 V/m		
	1970	217 Hz	28 V/m	1970	217 Hz	28 V/m		
	2450	217 Hz	28 V/m	2450	217 Hz	28 V/m		
	IMMUNITY to proximity magnetic fields IEC 61000-4-39	5240	217 Hz	9 V/m	5240	217 Hz		9 V/m
		5500	217 Hz	9 V/m	5500	217 Hz		9 V/m
5785		217 Hz	9 V/m	5785	217 Hz	9 V/m		
0.1342		2.1kHz	65 A/m	0.1342	2.1kHz	65 A/m		
13.56		50kHz	7.5 A/m	13.56	50kHz	7.5 A/m		
	0.030	CW	8 A/m	0.030	CW	8 A/m		



NOTE: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment as well as RF wireless communications equipment and the Via Nano 6.

The Via Nano 6 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Via Nano 6 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Via Nano 6, as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter (W)	Separation distance according to frequency of transmitter (m)			
	80 to 800 MHz $d = [3.5/10] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.7 GHz $d = [7/10] \sqrt{P}$	710, 745, 780, 5240, 5500, 5785 MHz $d = [6/9] \sqrt{P}$	385, 450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450 MHz $d = [6/28] \sqrt{P}$
0.01	0.035	0.070	0.067	0.021
0.1	0.110	0.221	0.211	0.070
1	0.350	0.700	0.667	0.214
10	1.107	2.213	2.108	0.700
100	3.500	7.000	6.670	2.143

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.



Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077
Compliance Information

PRODUCT IDENTIFICATION: Via® Nano 6.1

RESPONSIBLE PARTY:

Prentke Romich Company
1022 Heyl Road
Wooster, Ohio 44691 USA

CONTACT: Hardware Manager

TELEPHONE NUMBER AND/OR E-MAIL ADDRESS: 330.262.1984

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THIRD PARTY TESTING:



16740 Peters Road
Middlefield, OH 44062 USA
Phone: 440.632.5541
Fax: 440.632.5542
Toll Free: 877.405.1580

RESPONSIBLE PARTY SIGNATURE:

Date: November 20, 2024

(signature)

Name: Dustin Welty

Title: VP of Engineering

Location: Wooster, Ohio 44691 USA

Información de contacto



Fabricante

Prentke Romich Company

1022 Heyl Rd

Wooster, OH 44691

EE. UU.

Tel.: +1 330 262-1984 · +1 800 262-1984

Fax: +1 330 262-4829

info@prentrom.com

www.prc-saltillo.com/



Representante autorizado de la UE

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3

D-34117 Kassel

Alemania

Tel.: +49 (0) 561 7 85 59-0

Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29

info@prentke-romich.de

www.prentke-romich.de/



Importador de la UE

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3

D-34117 Kassel

Alemania

Tel.: +49 (0) 561 7 85 59-0

Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29

info@prentke-romich.de

www.prentke-romich.de/



Persona responsable e importador del Reino Unido

Liberator Ltd

“Whitegates”, 25-27 High Street

Swinstead, Lincolnshire NG33 4PA

Reino Unido

Tel.: +44 (0) 1733 370 470

Fax: +44 (0) 1476 552 473

info@liberator.co.uk

www.liberator.co.uk/

Representante autorizado en Australia

Liberator Pty Ltd

Level 4, 2-4 Holden Street, Ashfield, NSW, 2131

Australia

Tel.: +61 (0) 8 8211 7766

Fax: +61 (0) 8 8211 7733

info@liberator.net.au

www.liberator.net.au/